

**transcom**

TRANSCENDENCIAS COMERCIALES S.L.

Parque Empresarial Zuatzu C/Zubiberri nº31
 Edif. Urumea Finca 1 - Planta baja - Local 1
 20018 San Sebastián (Guipúzcoa) ESPAÑA
 Tel.: +34 943 224 360 Fax: +34 943 224 275
 www.transcomsl.com | e-mail: info@transcomsl.com

**SEGMENTED HOSE/LARGE HYDROKIT****UDI 111787634078****Obchodní název: Segmented Hose/Large Hydrokit**

Z-20

OBSAHUJE

Velké spekulum + obturátor + přívod vody (1 500 mm/59") + odpadní hadice s okénkem (1 250 mm/49")
 Všechny komponenty jsou bez ftalátů.

**POUZE PRO JEDNO POUŽITÍ**

Za žádných okolností se nesmí žádná část této soupravy používat znovu. Možný přenos chorob krví, kontaktem se stolicí a pohlavním stykem v případě opakovaného použití.

**UPOZORNĚNÍ**

Riziko perforace, pokud nejsou dodrženy pokyny.

Nesmí se používat u dětí nebo těhotných žen.

Pouze pro použití zdravotnickými pracovníky. Tento přístroj není určen pro laické uživatele.

Tato sada je určena pouze pro použití s přístroji na čištění tlustého střeva TRANSCOM. (Z-01 HC-1 CLASSIC, Z-02 HC-2000 CLASSIC, Z-04 HC-1, Z-05 HC-2000).

Před použitím zařízení Hydrokit si přečtěte kontraindikace a vedlejší účinky aktivních zařízení.

Přístroj by se měl používat v profesionálním kancelářském prostředí (zařízení typu lékařské ordinace).

**POKYNY**

Připojte přívod vody ke spekulu a zasuňte obturátor do spekula. Lubrikujte spekulum a zasuňte ho opatrně do rekta. Potom odstraňte obturátor a připojte odpadní hadici ke spekulu. Po každém ošetření zlikvidujte celou soupravu bezpečným způsobem, abyste zabránili kontaminaci.

**ODPOVĚDNOST**

Pokud tyto pokyny a indikace pro použití dodané společností TRANSCOM SL nejsou dodrženy, klient za to ponese odpovědnost.

**URČENÝM ÚČELEM:**

Prostřednictvím svých součástí a prostřednictvím spojení mezi aktivním zařízením a pacientem je souprava Hydrokit určena k podpoře zamýšleného účelu aktivních zařízení, čistící účinek má výhradně poslední jmenovaná položka.

**CÍLOVÉ SKUPINY PACIENTŮ:**

Pacienti, kteří vyžadují radiologické nebo endoskopické vyšetření.

**URČENÍ UŽIVATELÉ:**

Zdravotnický personál.

OČEKÁVANÉ KLINICKÉ PŘÍNOSY:

Prostřednictvím výplachu tlustého střeva umožňuje očistu tlustého střeva prostřednictvím spojení mezi aktivním zařízením a pacientem.

Biokompatibilní materiál speculum, nezpůsobuje alergie ani podráždění.

Konzistentní kvalita po celou dobu použitelnosti, spojení bez kapání, vzduchotěsné uzavření sáčku.

Kontrolovaná mikrobiální zátěž na povrchu zrcadel, aby se zabránilo potenciálním infekcím.

Hygienické postupy čištění, soupravy na jedno použití.

Ergonomický tvar a přízpusobivé vlastnosti anatomii populace.

VÝKONNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY:

Snadná manipulace, speculum je opatřeno chlopní a obturátor má prstencovitý tvar.

Speculum

- Konvexně zakřivený tvar na špičce pro snadné zavádění.

- Ergonomický tvar, který během ošetření zůstává na místě

- Kroužková konstrukce pro bezpečné uchycení na vodovodní potrubí a odpadní hadici.

Obturátor

- Obturátor s kulatou špičkou pro pohodlné zavádění

BEZPEČNÁ LIKVIDACE VÝROBKU

Po použití je třeba s komponenty manipulovat v souladu s univerzálními standardními bezpečnostními opatřeními, protože budou kontaminovány. Pro likvidaci těchto odpadů musí být k dispozici specifické dostatečně odolné sáčky, které musí být v nádobách odolných proti propíchnutí a rozbití a musí být uzavřeny a nakládáno s nimi jako se sanitárním odpadem srovnatelným s komunálním odpadem.

KONTRAIKADICE:

Poraněná, porušená nebo poškozená kůže, která přišla do styku s přístrojem.

VEDLEJŠÍ ÚČINKY:

Při používání zařízení nebyly pozorovány žádné vedlejší účinky.

Jakákoli závažná událost související s výrobkem musí být nahlášena výrobcí a zdravotnickému úřadu.

Viz těsnění na sáčku.



Viz těsnění na sáčku.



SLOVNÍČEK SYMBOLŮ			
			
Kód šarže	Určeno na jedno použití	Uchovávat mimo sluneční záření	Datum použitelnosti
			
Upozornění	Výrobce	Horní teplotní limit	Pokud je obal poškozený, nepoužívejte a přečtěte si návod k použití
			
Jedinečným identifikátorem prostředku	Zdravotnický prostředek	Lomljivo, pažljivo rukovati	Čuvati na suhom mjestu
			
Datum výroby	Neklopit	Pogledati priručnik/knjižicu s uputama	Broj modela

Rev. 08:2022-04