



transcom
TRANSCENDENCIAS COMERCIALES S.L.

Parque Empresarial Zuatzu C/Zubierri nº31
Edif. Urumea Finca 1 - Planta Baja - Local 1
20018 San Sebastián (Guipúzcoa) ESPAÑA
Tel.: +34 943 224 360 Fax: +34 943 224 275
www.transcomsl.com | e-mail: info@transcomsl.com



8mm GRAVITY HYDROKIT



Kereskedelmi név: 8mm Gravity Hydrokit

Z-11

TARTALMAZ

Nagy spekulum + obturátor + irrigátorcső 8 (1250 mm /49") + ablakkal ellátott kivezetőcső (1250 mm/49")
A termék minden összetevője ftalátmentes.



CSAK EGYSZER HASZNÁLJA FEL

Semmilyen körülmények között se használja fel újra a készlet egyetlen elemét se. Újra történő felhasználás esetén betegségek vihetők át vér vagy széklet útján, továbbá nemi betegségek is átadódhatnak.



FIGYELEM!

Amennyiben nem követi az használati utasítást, perforáció veszélye állhat fenn.

Ne használja gyermekek és várandós nők esetén.

Kizárólag egészségügyi szakemberek általi használatra. Az eszközt nem laikus felhasználók számára tervezték. A készletet csak a TRANSCOM vastagbél tisztító eszközökkel együtt szabad használni. (Z-01 HC-1 CLASSIC, Z-02 HC-2000 CLASSIC, Z-04 HC-1, Z-05 HC-2000).

A Hydrokit használata előtt olvassa el az aktív eszközök Ellenjavallatai és Mellékhatásai című részt is.

Az eszköz alkalmazására professzionális szakmai környezetben (orvosi rendelői berendezésként) kerülhet sor.



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Csatlakoztassa az irrigátorcsövet a spekulumhoz, és illessze az obturátort a spekulumba. Síkosítsa meg a spekulumot és óvatosan helyezze be a végbélbe. Ezt követően távolítsa el az obturátort, és illessze a hulladékcsövet a spekulumba. Minden kezelés után biztonságos módon dobja el a teljes készletet a fertőzések elkerülése érdekében.



FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Amennyiben az ügyfél nem követi a TRANSCOM SL által rendelkezésre bocsátott használati utasítást és a javallatokat, a felelősség az ügyfelet terheli.



RENDELTETÉS:

A Hydrokit az aktív eszközök rendeltetésszerű használatát hivatott segíteni a részegységei, illetve az aktív eszköz páciensre történő rácsatlakoztatása révén, a tisztítási művelet kizárólag az utóbbin keresztül történik.



PÁCIENS-CÉLCSOPORT:

Radiológiai vagy endoszkópos vizsgálatot igénylő páciensek.



MEGCÉLZOTT FELHASZNÁLÓI KÖR:

Egészségügyi szakemberek.

VÁRHATÓ KLINIKAI HATÁS:

Az aktív eszköz páciensre történő rácsatlakoztatása révén lehetővé teszi a vastagbél tisztítását bélöblítés módszerével.

Biokompatibilis anyagú speculum, nem okoz allergiát és irritációt.

Változatlan minőség a teljes eltarthatósági idő alatt, cseppmentes csatlakozások, légmentesen lezárt tasak.

A speculum felületén végbemenő mikrobiális folyamatok ellenőrzése az esetleges fertőzések elkerülése érdekében.

Higiénikus tisztítási eljárások, egyszer használatos készletek.

Ergonomikus kialakítás és anatómiai adottságokhoz igazítható jellemzők.

TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK:

Könnyen kezelhető: a speculum karimával rendelkezik, az obturátor gyűrűs kialakítású.

Speculum

- Kúpos vég a könnyű behelyezés érdekében
- Ergonomikus kialakítás, hogy kezelés közben a helyén maradjon
- Gyűrűs kialakítás, hogy biztonságosan csatlakoztatható legyen a vízcsőre ill. szennyvíz-elvezetésre.

Obturátor

- Lekerekített vég a kényelmes behelyezés érdekében

A TERMÉK BIZTONSÁGOS ÁRTALMATLANÍTÁSA

Használat után a részegységeket szennyeződésük miatt az általános óvintézkedéseknek megfelelően kell kezelni. Az ilyen hulladékok ártalmatlanításához kellően strapabíró, lyukadás- és törésbiztos tárolókban tartott speciális tasakoknak kell rendelkezésre állniuk. A tasakok gondosan lezárandók és a kommunális hulladékhoz hasonlóan higiéniai hulladékként kezelendők.

ELLENJAVALLATOK:

Sebes vagy egyéb módon sérült bőrfelület ne érintkezzen az eszközzel.

MELLÉKHATÁSOK:

Az eszköz használata során eddig nem ismertek mellékhatások.
















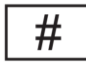
A termékkel kapcsolatos bármilyen súlyos esetet jelenteni kell a gyártónak és az egészségügyi hatóságnak.

Lásd a tasak záró részén



Lásd a tasak záró részén



SZIMBÓLUM SZÓSZEDET			
			
Gyártási tétel kódja	Újrafelhasználása tilos	Napfénytől elzárva tartandó	Felhasználható
			
Vigyázat	Gyártó	Felső hőmérsékleti határ	Ne használja, ha a csomag sérült, és olvassa el a használati utasítást
			
Egyedi eszközazonosító	Orvostechnikai eszköz	Törékeny, kezelje óvatosan	Tartsa szárazon
			
Gyártási dátum	Felfelé	Olvassa el a használati útmutatót/kézikönyvet	Modellszám

Rev. 08:2022-04